

“一協紀” 安全注射筆專用針(滅菌)


“Schiff” Safety Pen Needle (Sterile)

衛部醫器輸字第 036938 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號：Safe Block

預期用途：注射筆專用針是一次性使用、無菌裝置設計，用於注射填充於筆型注射器的藥物之注射針。

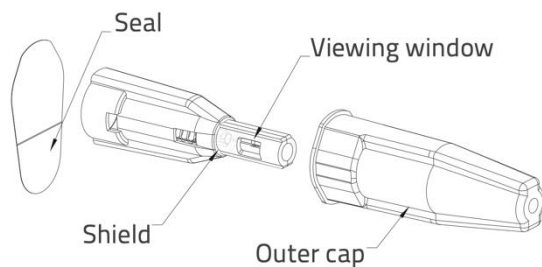

主要特徵：

- 使用後針具自動內縮。
- 可視的紅色指示線方便識別針頭是否內縮。
- 針頭安全地包含在保護罩後面，防止意外暴露。
- 針頭保持隱藏狀態。
- 觀察窗可以檢查通過針頭的藥物。
- 翼形設計。
- 提供三種尺寸供選擇：

31G x 5mm(包裝：黃白)、31G x 6mm(包裝：紫白)、31G x 8mm(包裝：藍白)

使用說明：

在選擇適合您的針頭長度、注射部位和方法時，請先諮詢您的專業醫事人員。
記得旋轉注射部位！


閱讀封條上的針頭規格 (G) 和長度 (mm)，以確保您使用的是正確的筆針頭，或者如果您有視力上的障礙，請務必尋求他人幫助。 如果您是專業醫事人員、看護人或協助患者的家庭成員，也請這樣做。

建議的注射方法：以 90°（度）角垂直注射到平坦的皮膚上。 替代注射方法：如果您的專業醫事人員建議，您也可以進行皮膚褶皺（斜角度）。


1. 取下封口紙張。

檢查封口紙張，如果遺失或損壞，請使用新的安全筆針頭。

檢查針頭，如果針頭出現損壞，請使用新的安全筆針頭。

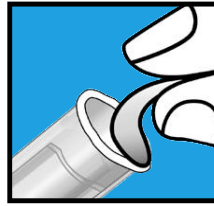


2. 將安全筆針頭裝到注射筆上，用筆將其保持在一個軸上並扭轉直至擰緊。切記：不要過度扭轉

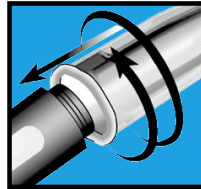

3. 取下外蓋。


確保在使用前不要按壓護罩，因為護罩上的任何壓力都可能導致針頭鎖定並且使筆針無法使用。如果觀察窗中出現紅色條紋或針頭似乎已損壞，請使用新的安全筆針頭。

保留外蓋

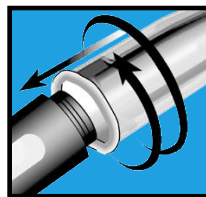


4. 檢查針是否在觀察窗中可見

*如果在觀察窗中看不到針頭，請使用新的安全筆針頭。

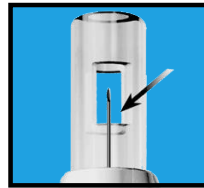


5. 若注射筆設備製造業者建議，請測試針具可用性。可透過觀察窗可見的針尖上應出現一滴液體。*假設測試不成功，請使用新的安全筆針頭。

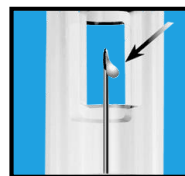

6. 設定處方劑量




7. 將針頭以 90 度角插入扁平皮膚中，一次性的動作直到將藥物注入為止。
*在劑量完全注入之前不要取下針頭。
具體保持時間參見不同筆式注射器設備製造業者的使用說明。

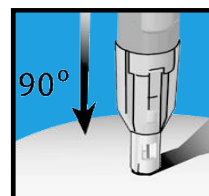

8. 當藥物注入完成時，從皮膚上取下針頭。
防護罩會自動覆蓋針頭，直到它鎖定。

*觀察窗口中將出現一條紅色線。代表針頭被鎖定，不能重複使用。***注意：液體可能會回到安全筆針頭中，這可能導致注射後液體留在皮膚上。**

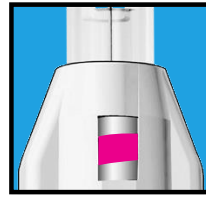

9. 擰下針頭，將其從筆式注射器裝置中取下，建議您用外蓋蓋住針具的後端。



10. 將使用完畢的注射筆針頭丟棄至尖銳物品廢棄箱。



注意事項：

***將其放在兒童接觸不到的地方。**

***避免感染：**

注射前，清潔和消毒注射部位。始終遵從您地方法律、法規處理醫療廢棄物規定回收。

***如果針頭損壞或遺失，或者護蓋或外帽針頭看起來損壞，請勿使用。**

***有關具體的儲存和處理說明，請參閱藥物和筆式注射器設備的使用說明。**

與設備有關的任何嚴重事件都應報告給製造業者和當地主管機構（如適用）。

醫療器材商名稱：一協紀股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)

製造業者名稱：HTL-STREFA S.A.

製造業者地址：UL. ADAMOWEK 7, 95-035 OZORKOW, POLAND